

INSTRUCCIONES DE USO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION

DENTILAC

Pasta adhesiva para prótesis dentales

Boquilla de Precisión

Adherencia Segura

COMPOSICION:

DENTILAC sabor Neutro

Cada 100 g de pasta contiene:

Copolímero de Metilvinil eter anhídrido maleico	30 g
Vaselina líquida	27 g
Carboximetilcelulosa sódica	22 g
Vaselina sólida	21 g

DENTILAC sabor Menta

Cada 100 g de pasta contiene:

Copolímero de Metilvinil eter anhídrido maleico	30 g
Vaselina líquida	27 g
Carboximetilcelulosa sódica	22 g
Vaselina sólida	21 g
Composición dental	0,1 ml

Indicaciones: DENTILAC ayuda a fijar los puntos flojos y brinda una adherencia segura de las prótesis dentales.**Información de uso:** Las prótesis dentales adecuadas por su odontólogo a la cavidad bucal, con un ajuste perfecto, teóricamente, no necesitan del uso de adhesivos. Sin embargo, en la práctica esto es difícil, debido a los cambios naturales que sufren los tejidos y al uso de las prótesis durante un cierto tiempo.

DENTILAC es una pasta compuesta por polímeros sintéticos que asegura la íntima adaptación de la prótesis a los tejidos de soporte y su estabilidad ante la diversidad de movimientos funcionales (hablar, comer, bostezar, etc).

Instrucciones: Prótesis completa

Prótesis superior:

Limpie cuidadosamente la prótesis y la mucosa bucal eliminando restos de comida. Aplique 3 pequeñas porciones de aproximadamente 1 cm, en la parte central y laterales de la prótesis seca o húmeda. Coloque la prótesis dental en su posición y presione durante unos segundos.



Prótesis inferior:

Aplicar DENTILAC como se indica para la prótesis superior.



Prótesis parcial:

Aplique 3 pequeñas porciones de aproximadamente 1 cm, en la parte central y laterales de la prótesis seca o húmeda. Coloque la prótesis dental en su posición y presione durante unos segundos.



Cada usuario debe adaptar en forma individual la frecuencia y cantidad de DENTILAC que debe usar.

La boquilla de precisión permite aplicar la cantidad justa y controlada para:

- otorgar una mejor fijación
- aumentar la estabilidad de la prótesis
- reforzar el sellado de la prótesis, evitando la introducción de partículas de alimentos
- lograr una prótesis mejor adaptada permitiendo el aumento de la fuerza masticatoria.

Esperar unos 5 minutos antes de ingerir alimentos.

Advertencias y precauciones: Aplicar la pasta sólo en presencia de mucosas bucales sanas. Para mejores resultados, oprima el tubo desde la base, aplane, no lo enrosque. Mantenga la tapa y la abertura secas y limpias, para que no se forme una dureza. Consulte periódicamente a su odontólogo para asegurar una fijación adecuada de su prótesis.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Reacciones adversas: En casos raros puede producirse hipersensibilidad de la mucosa bucal o general. De ocurrir dicha reacción consulte a su odontólogo.

Presentación:

DENTILAC sabor Neutro: envases con 20,40 y 60 g

DENTILAC sabor Menta: envases con 20,40 y 60 g

SEGURIDAD DEL ENVASE:

Pomo multilaminado. El estuche presenta 2 etiquetas autoadhesivas de seguridad.

Una en cada extremo del mismo. Constatar integridad del estuche.

No utilizar luego de su vencimiento. No colocar en heladera y/o lugares fríos

Conservar el pomo bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C

Mantener fuera del alcance de los niños.

Cuide su salud bucal.

“Consulte periódicamente a su Odontólogo”



**Mantener
en posición
vertical.**

Autorizado por la ANMAT PM -1404 -11

Director Técnico: Vicente López González. Farmacéutico.



Laboratorios Bernabó

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Teléfonos: 4501-3278 / 79

www.laboratoriosbernabo.com

Elaboración: Cnel. Méndez 440, B1875DQJ, Wilde, Pcia. de Buenos Aires.